

Un formidable duo pour sécuriser les collages



CRB Cera Resin Bond

Avec le système **Cera Resin Bond** vous avez tout loisir de coller divers matériaux de façon sûre et durable et ce en bouche comme en extra oral.

Vous pouvez par exemple utiliser **CRB** pour étendre ou modifier rapidement des restaurations céramiques avec des matériaux photo polymérisables. De plus, **Cera Resin Bond** permet de combiner des résines polymérisables à froid avec des matériaux photo polymérisables pour couronnes, comme de combiner aussi entre eux différents composites photo polymérisables pour veneers. Ainsi plus aucune limite ne s'oppose à la réalisation personnalisée de dents prothétiques, à l'aide de composites photo polymérisables de reconstitution.

Ces adhésifs résistent extrêmement bien à l'humidité et aux contraintes thermiques.




Des produits éprouvés pour une meilleure dentisterie

Sécuriser les collages sans aucun compromis

Cera Resin Bond excelle dans la liaison fiable entre composites (photo ou auto polymérisables) et céramiques.


C'est facile à manipuler et ça convient à pratiquement toutes les indications rencontrées en cabinet ou au laboratoire, du fait qu'il peut s'utiliser aussi bien en bouche qu'à l'extérieur.

Une restauration collée avec **Cera Resin Bond** garantit une liaison très fiable, même à long terme.

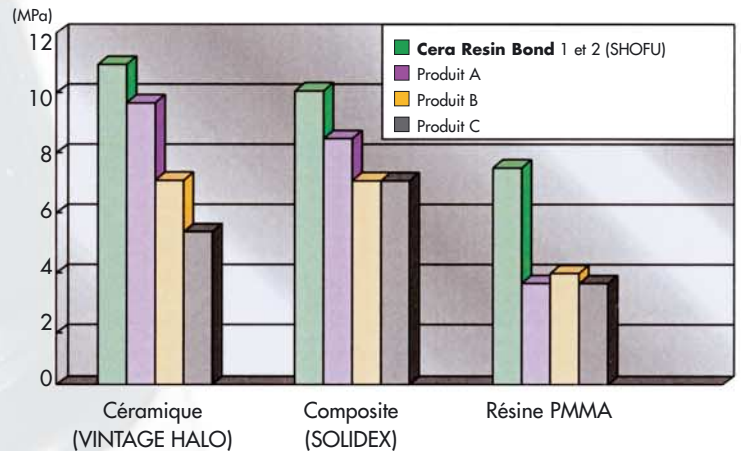

Résistance du collage de composites et différents matériaux avec **Cera Resin Bond** comparée aux systèmes adhésifs céramiques/résines d'autres fabricants

Application simple et rapide

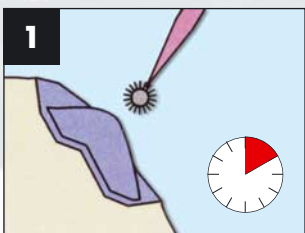

Appliquer **CRB 1** / laisser **10 secondes**



Appliquer **CRB 2** / laisser **10 secondes**

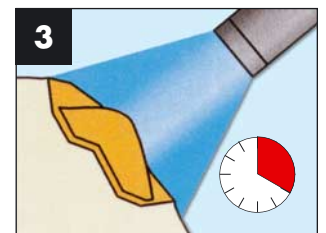


Photo polymériser pendant **20 secondes** / prêt pour l'application du composite

Multiples Possibilités :

- utilisation intra et extra-buccale
- réparation et correction de couronnes et bridges céramiques avec des composites de reconstitution
- finition de dents céramiques ou résines à l'aide de composites
- collage en toute sécurité de résines auto polymérisables sur composites photo polymérisables de reconstitution
- accroissement de l'adhérence des dents acryliques cross-linked sur les résines prothétiques auto polymérisables
- peut être combiné avec le système adhésif ML Primer



KIT CRB'
RÉF. 1741

SHOFU DENTAL GMBH European Head Office

Am Brüll 17 · D-40878 Ratingen · Germany
Tél: +49 (0) 21 02 / 86 64-0 · Fax: +49 (0) 21 02 / 86 64-64 · E-mail: info@shofu.de · www.shofu.de

IMPORTATEUR-DISTRIBUTEUR POUR LA FRANCE
SOCIÉTÉ DES CENDRES

39, rue des Francs Bourgeois · 75004 PARIS · Tél: 01 44 59 24 24 · Fax: 01 44 59 24 49

