

PHARMALLOY 70 et 43

"elsadent"

PROPRIETES PHYSIQUES

	PHARMALLOY 70	PHARMALLOY 43
• Résistance à la compression après 1 heure :	120 Mpa	185 Mpa
• Résistance à la compression après 24 heures :	380 Mpa	405 Mpa
• Expansion à la prise :	0,015%	0,01%
• Temps de travail :	5 mn 30 s	4 mn 30 s à 5 mn
• Taille des particules :	<40 μ	N/A

DUREE DE VIE

5 ans

PRESENTATION

Existe en simple dose, double et triple dose.

Boîte de 50 capsules.

Mode d'emploi

- 1 Placer la capsule entre le pouce et l'index.
- 2 Appuyer sur le dessus de la capsule avec le pouce jusqu'à l'arrêt de l'enfoncement.
- 3 La capsule est maintenant prête à être triturée.

TEMPS DE MELANGE	
PHARMALLOY 70	PHARMALLOY 43
6s pour dose 1 et 2	8s pour dose 1 et 2
8s pour dose 3	10s pour dose 3

Ces valeurs sont données pour un amalgamateur de type Silamat. Pour d'autre types d'amalgamateurs, vérifier le nombre de cycles/secondes et adapter le temps de mélange en rapport afin d'obtenir la meilleure amalgamation possible.